

Ochranný štít na obličej
Katalogové označení: OOS_4
NÁVOD



Ochranné bradové štíty slouží jako ochrana proti zasažení kapénkami virů. Ochranný štít je určen pro celodenní práci nebo při práci v užším kontaktu s lidmi jako například ve zdravotnictví, v kadeřnictví, v obchodě a podobně. Před použitím čtěte návod k použití a proveďte, zda není štít poškozený a při nasazování na obličej postupujte podle návodu. Ochranný štít je vhodnou alternativou pro uživatele trpící problémy dýchacích cest a nošení roušky je pro ně obtíží.

MANUÁL K SESTAVENÍ:

1. Připevněte kryt k šedému pásu krycími nýty (šedými)
2. Pevně nýty stlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí
3. Provlékněte gumičky dírami obličejového pásu
4. Použijte plastové nýty (černé) na uchycení gumiček. Nýty pevně stlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí
5. Upravte délku gumiček, aby plastový štít držel na svém místě
6. Umístěte štít na hlavu a zkontrolujte, jestli správně sedí – štít nesmí být volný a padat dolů k bradě

POUŽITÍ:

1. Odstraňte ochrannou fólii z vnější strany štítu
2. Přizpůsobte délku gumiček
3. Připevněte za uši

Vše, co potřebujete pro umytí štítu je hadřík, mýdlo a teplá voda (do 30°C). Doba životnosti je přibližně 200 dnů.

Skladujte při teplotách od +5 do +30 °C.

Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855,
www.alficorp.cz