

# RESPIRÁTOR FFP2 NR PRIMUS

## NÁVOD K POUŽITÍ



### Název osobního ochranného prostředku:

Respirátor FFP2 NR Primus

### Jméno a adresa výrobce:

Cool Agency, s.r.o, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Česká republika

**Určený účel použití:** Určeným účelem respirátoru je ochrana jeho nositele filtrací vdechovaného vzduchu a snížení přenosu infekce mezi osobami. Účinnost filtrace je  $\geq 95\%$ . Jedná se o jednorázový prostředek.

**Typ:** Filtrační polomaska proti částicím EN149:2001+A1:2009

**Účinnost:** FFP2 NR

Respirátor FFP2 NR Primus je osobním ochranným prostředkem dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům.

### Postup aplikace:

Prostředek si nasazujte jen čistýma rukama. Všechny součásti respirátoru by měly být před použitím zkontrolovány, zda nejsou poškozené. Používejte obě ruce.

1. Rozbalte respirátor a uchopte ho za postranní gumičky.
2. Nasadte respirátor na obličej tak, aby pokrýval nos a ústa – a končil pod bradou.
3. Postranní gumičky přichyťte za uši.
4. Prsty zkontrolujte a dotvarujte svorku, která přiléhá k nosu.
5. Zkontrolujte po obvodu respirátoru, že přiléhá k obličej.

Ilustrativní obrázek postupu aplikace:



### Kontrola těsnosti a nasazení:

1. Oběma rukama zakryjte přední část respirátoru – postupujte opatrně, aby se tím nezměnila poloha respirátoru.
2. Prudce vydechněte.

3. Pokud bude vzduch pronikat kolem nosu, upravte tvar nosové svěrky. Znovu zkontrolujte těsnost nasazení postupem uvedeným shora.

4. Pokud bude vzduch pronikat kolem okrajů polomasky, upravte boční úchyty kolem uší, dokud se průnik vzduchu neodstraní.

Těsnost nasazení překontrolujte postupem shora.

5. Pokud se nepodaří prostředek náležitě nasadit, vyměňte respirátor a původní dále nepoužívejte.

6. Pokud vzduch neproniká, můžete respirátor použít.

Pro dosažení lepší těsnosti použijte spojku s upnutím za hlavu.

### Pokyny pro skladování:

Chraňte před slunečním zářením a před vlhkem.

Teplotní rozmezí -5 až +40 stupňů Celsia

### Upozornění:

- Vždy se ujistěte, že výrobek je kompletní, správně nasazen a nošen po celou dobu expozice.
- Tento prostředek nechrání proti plynům/výparům.
- Tento prostředek nepoužívejte jako ochranu před atmosférickými kontaminanty, již koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví či život.
- Nepoužívejte, máte-li vousy nebo jakékoliv jiné ochlupení obličeje, které by mohlo zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem.
- Tento prostředek neeliminuje riziko kontraktace nemoci či infekce.
- Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, ohlaste společnosti Cool Agency, s.r.o. a příslušnému místnímu kontrolnímu úřadu.
- Zničte a vyměňte Respirátor FFP2 NR Primus, jestliže je kontaminován krví nebo jinými infekčními kontaminanty, když je poškozen, když se dýchání stává obtížím. Po ukončení jeho používání zajistěte jeho likvidaci v souladu s požadavky směrnice na likvidaci nebezpečného infekčního materiálu.
- Tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití. Jeho opakované použití může způsobit křížovou kontaminací, ohrozit bezpečnost uživatele a zhoršit celkový výkon produktu. Kontaminované výrobky je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad

v souladu s národními předpisy. Neupravujte, nečistěte ani neopravujte tento prostředek.

- Tento prostředek není ohnivzdorný. Nepoužívejte v přímém kontaktu s otevřeným ohněm.
- Nepoužívejte v ovzduší obsahující méně než 19,5% kyslíku (definice společnosti Cool Agency, s.r.o.; některé země mohou mít vlastní definice nedostatku kyslíku; pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc)

Nedodržení výše uvedených pokynů nebo neodborná manipulace s prostředkem na ochranu dýchacích orgánů během pobytu uživatele v kontaminovaném prostředí může mít nežádoucí účinky na zdraví a vést k vážnému onemocnění.

Měsíc a rok výroby a expirace prostředku jsou uvedeny na obalu prostředku.

### Notifikovaná osoba zapojená do posouzení shody:

MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd.Sti. Adresa : Kücükbakkalköy Mahallesi Yenidogan Cad.No:21 Atasehir/Istanbul

**Číslo notifikované osoby:** 2841

**Tabulka značek/slovníček:**

Prohlášení o shodě naleznete na [www.promedor24.com](http://www.promedor24.com).

**Datum poslední revize návodu k použití:** 2021-02-10

Název symbolu	Symbol	Popis a odkaz
Značka CE	CE 2011	Označuje soulad se všemi platnými předpisy a směrnici Evropské unie se zapojením oznamovacího subjektu – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Zdroj: Nařízení 2016/425 (OOP), Směrnice 93/42/EHS (ZP).
Účinnost filtrace – klasifikace	FFP2	Označuje klasifikaci produktu v návaznosti na účinnost filtrace respirátoru. Zdroj: EN 149.
Výrobce		Označuje výrobce zdravotnického prostředku dle směrnice EU 93/42/EHS. Zdroj: ČSN EN ISO 15223-1:2017.
Adresa společnosti Cool Agency, s.r.o.	KONĚVOVA 2660/141 130 00 PRAHA 3 - ŽIŽKOV ČESKÁ REPUBLIKA	Označuje kontaktní adresu dle požadavků nařízení OOP (EP) 2016/425.
Datum výroby		Označuje datum, kdy byl prostředek vyroben. Zdroj: ČSN EN ISO 15223-1:2017.
Použit do data		Označuje datum, po jakém už prostředek nemá být použit. Zdroj: ČSN EN ISO 15223-1:2017.
Kód šarže	LOT	Označuje kód/číslo šarže, aby bylo možné šarži identifikovat. Zdroj: ČSN EN ISO 15223-1:2017.
Obal určený k recyklaci		Označuje, že obal je určen k recyklaci do kontejnerů k tomu určených.
Nepoužívat opakovaně		Označuje, že prostředek je určen k jednorázovému použití. Zdroj: ČSN EN ISO 15223-1:2017.
Chránit před vlhkem		Označuje, že prostředek musí být chráněn před vlhkostí. Zdroj: ČSN EN ISO 15223-1:2017.
Green dot		Označuje finanční příspěvek na národní společnost recyklace obalů dle evropské směrnice č. 94/62 a odpovídajících národních zákonů. Organizace pro recyklaci obalů, Evropa.
Likvidace		Označuje, že obal je nutno vyházet do kontejnerů k tomu určených.
Chránit před slunečním zářením		Označuje prostředek, který vyžaduje ochranu před světelnými zdroji. Zdroj: ČSN EN ISO 15223-1:2017.