

NÁVOD K POUŽITÍ

Respirátor FFP2 PRIMUS - Promedor24

Filtrační polomaska proti částicím vyhovující normě EN 149:2001+A1:2009 FFP2

Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování **pevných částic a kapalných aerosolů**.

Filtruje nejméně 94 % vzdušných částic (aerosolů) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru).

Před použitím prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu. Respirátor je určen pro jednorázové použití.

Bezpečnostní upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorech. Zaměstnanec musí být před použitím prostředku vyškolen zaměstnavatelem o správném používání v souladu s platnými bezpečnostními normami a standardy ochrany zdraví.

Nepoužívejte tyto prostředky v kontaminované oblasti za těchto okolností: 1. Atmosféra obsahuje méně než 19,5 % kyslíku

2. K ochranně proti plynům nebo páram znečišťující látky nebo jejich koncentrace jsou-li neznámé nebo bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví

3. Koncentrace znečišťujících látek překračují maximální koncentrace použití dle platných OSHA standardů nebo omezení dle platných vládních předpisů

4. Použití ve výbušném prostředí.

Nepoužívejte prostředek s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti.

Návod k použití: 1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy 2. Přetvarujte nosní výztuhu, přiložte respirátor k obličejí

3. Přetáhněte upínací pásky přes uši 4. Dotvarujte nosní výztuhu 5. Ujistěte se, že prostředek řádně těsní. Celý postup návodu k použití je znázorněn na obrázek na obalu.



Kontrola těsnosti: 1. Pro vyzkoušení správného těsnění prostředků, položte obě ruce na prostředek a ostře vydechněte.

2. Vyměňte prostředek okamžitě v případě problematického dýchání, nebo při poškození či zdeformování 3. Vyměňte prostředek v případě, že nemůžete

dosáhnout řádného utěsnění 4. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem pro bezpečné používání prostředku.

Výrobek musí být skladován v suchém prostředí při teplotách -20°C až +40°C a vlhkosti menší než 80%

Nepoužívejte po době použitelnosti nebo při poškození obalu.

Výrobce: COOL AGENCY SRO, Koněvova 2660/141, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, Zizkov

Dovozce: ALFI Corp., s.r.o.

Adresa: Provozní 5492/

Vyrobeno v České Republice