

NÁVOD K POUŽITÍ

Respirátor FFP3 EnMed

Filtrační polomaska proti částicím vyhovující normě EN 149:2001+A1:2009 FFP3

Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování **pevných částic a kapalných aerosolů**.

Filtruje nejméně 99 % vzdušných částic (aerosolů) až do velikosti 0,3 µm (mikrometru).

Před použitím prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu. Respirátor je určen pro jednorázové použití. Maximální účinnost respirátoru je 8 hodin od otevření originálního obalu.

Bezpečnostní upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorech. Zaměstnanec musí být před použitím prostředku vyškolen zaměstnavatelem o správném používání v souladu s platnými bezpečnostními normami a standardy ochrany zdraví.

Nepoužívejte tyto prostředky v kontaminované oblasti za těchto okolností:

1. Atmosféra obsahuje méně než 19,5 % kyslíku
2. K ochraně proti plynům nebo páram znečišťujícím látky nebo jejich koncentrace jsou-li neznámé nebo bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví
3. Koncentrace znečišťujících látek překračují maximální koncentrace použití dle platných OSHA standardů nebo omezení dle platných vládních předpisů
4. Použití ve výbušném prostředí.

Nepoužívejte prostředek s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti.

Návod k použití:

1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy
 2. Předtvarujte nosní výztuhu, přiložte respirátor k obličeji
 3. Přetáhněte upínací pásky přes uši
 4. Dotvarujte nosní výztuhu
 5. Ujistěte se, že prostředek řádně těsní.
- Celý postup návodu k použití je znázorněn na obrázek na obalu.



Kontrola těsnosti:

1. Pro vyzkoušení správného těsnění prostředků, položte obě ruce na prostředek a ostře vydechněte.
2. Vyměte prostředek okamžitě v případě problematického dýchání, nebo při poškození či zdeformování
3. Vyměte prostředek v případě, že nemůžete dosáhnout řádného utěsnění
4. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem pro bezpečné používání prostředku.

Výrobek musí být skladován v suchém prostředí při teplotách -20°C až +40°C a vlhkosti menší než 80%

Nepoužívejte po době použitelnosti nebo při poškození obalu.

Výrobce: EN ECZA DEPOSU A.S.

Atatürk Mh. 31043 Sk. Kubat Apt. No:8/B Mezitli/Mersin/TURKEY

Distributor: ALFI Corp., s.r.o.

Adresa: Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice 722 00

www.alficorp.cz

Vyrobeno v Turecku