

1.1. Návod k použití:

- 1) Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce.
- 2) Držte respirátor tak, jak je to znázorněno, s nosní částí ve špičkách prstů.
- 3) Zvedněte respirátor na obličej a umístěte jej tak, aby byl zakryt nos, ústa.
- 4) Zajistěte respirátor tahem za popruhy za každým uchem.
- 5) Jemně sevřete nosní část a pohodlně a elegantně upravte lícování přes nos a kolem obličeje.
- 6) Oběma rukama přidržte přední část respirátoru a zkontrolujte ji proti úniku vzduchu kolem úst a nosu. Respirátor musí na obličejí těsnit..



1.2. Odstranění respirátoru:

Během používání mohou být respirátory kontaminovány a neměli by jste se jich dotýkat. Pokud se však dotknete rukou, musíte se okamžitě a důkladně omýt.

Odstranění a likvidace musí být prováděny velmi opatrně, protože při používání se respirátor sám může stát zdrojem infekce.

Pokyny pro odstranění:

- Ušní smyčku vytáhněte zpoza jednoho ucha a poté za druhé.
- Držte respirátor za ušní smyčku.
- Ihned zlikvidujte ve správném obalu.
- Hygiena rukou by měla být prováděna po odstranění a likvidaci respirátoru.

1.3 Varování

- Pokud je respirátor poškozen nebo je kontaminován dýcháním sekretů nebo jiných tělních tekutin, je třeba vyměnit a zlikvidovat jako zdravotní odpad.
- Nepoužívejte, pokud je respirátor extrémně zmačkaný.
- Nepoužívejte s vousy nebo jinými vlasy na obličejí nebo pokud jiné obličejové podmínky brání dobrému utěsnění mezi obličejem a okrají respirátoru.
- Nepoužívejte v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5%.
- Nepoužívejte ve špatně větraných prostorách.
- Nepoužívejte při hašení požáru a páskování.
- Mytí alkoholem, vodou a poškodí respirátor nenávratně poškodí .
- Respirátor poškozuje také autolakování a jiné formy zahřívání.
- Opakované použití je zakázáno.
- Respirátor se nesmí používat déle než na jedno použití.
- Nedotýkejte se přední části respirátoru, když jej odstraňujete.
- Respirátor vyměňte za nový, jakmile bude vlhký.

- Nepoužívejte ve výbušné atmosféře.
- Respirátor skladujte mimo kontaminované oblasti, pokud se nepoužívá.
- Likvidujte použitý produkt v souladu s platnými předpisy vaší země.

1.4. Informace notifikovaného orgánu

Notifikovaný orgán pro module B+C2	MTIC InterCert s.r.l Via Moscova, 11-20017 RHO(MI)- Itálie
Číslo notifikovaného orgánu notifikovaného orgánu	0068

ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, ÚDRŽBA

2.1. Čištění a dezinfekce:

Mytí alkoholem, vodou a saponátem poškodí nevratně dýchací cesty.

2.2. Údržba:

Životnost respirátoru závisí na době používání, péči a údržbě.

Před použitím produkt důkladně zkontrolujte. Pokud je některá část výrobku poškozena, okamžitě vyměňte celý produkt. Doporučujeme, aby respirátor byl uchováván ve vhodném čistém obalu, pokud se nepoužívá.

V každé situaci musí být produkt vyměněn nejdéle po uplynutí jedné směny (maximálně 12 hodin).

www.royax.eu

