

NÁVOD K POUŽITÍ

Respirátor FFP2 NR AIR QUEEN

Nanovláknový respirátor AirQUEEN® s virovým záchytem >97 % určen pro všechny, kteří potřebují vyšší stupeň ochrany.

Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů. Nanovláknový respirátor AirQUEEN® s filtrační účinností nanostrukturované membrány >97 %. Respirátor je vyroben v Koreji a je certifikován dle normy EN 149:2001+A1:2009.

Před použitím prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu. Respirátor je určen pro jednorázové použití.

Bezpečnostní upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorech. Zaměstnanec musí být před použitím prostředku vyškolen zaměstnavatelem o správném používání v souladu s platnými bezpečnostními normami a standardy ochrany zdraví.

Nepoužívejte tyto prostředky v kontaminované oblasti za těchto okolností:

1. Množství kyslíku v prostředí používání respirátoru musí být minimálně 17 %.
2. K ochranně proti plynům nebo páráům znečišťující látky nebo jejich koncentrace jsou-li neznámé nebo bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví
3. Koncentrace znečišťujících látek překračují maximální koncentrace použití dle platných OSHA standardů nebo omezení dle platných vládních předpisů
4. Použití ve výbušném prostředí.

Nepoužívejte prostředek s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti.

Návod k použití: 1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy 2. Předtvarujte nosní výztuhu, přiložte respirátor k obličej

3. Přetáhněte upínací pásky přes uši 4. Dotvarujte nosní výztuhu 5. Ujistěte se, že prostředek řádně těsní. Celý postup návodu k použití je znázorněn na obrázek na obalu.



Kontrola těsnosti:

1. Pro vyzkoušení správného těsnění prostředků, položte obě ruce na prostředek a ostře vydechněte.
2. Vyjměte prostředek okamžitě v případě problematického dýchání, nebo při poškození či zdeformování
3. Vyjměte prostředek v případě, že nemůžete dosáhnout řádného utěsnění 4. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem pro bezpečné používání prostředku.

Nepoužívejte po době použitelnosti nebo při poškození obalu. Skladujte maximálně po dobu 5 let v teplotách od 10–30 °C a vlhkosti maximálně 50 %.

Výrobce: TOPTEC Co., Ltd.

Dovozce: ALFI Corp., s.r.o.

Vyrobena v Koreji